

Lagerung

Vor Sonneneinstrahlung geschützte Lagerung wird empfohlen.

Haltbarkeit und Entsorgung

Ersetzen Sie bei normalen Gebrauch den Nasensauger nach einer max. Nutzungsdauer von 2 Jahren durch einen neuen. Das Produkt kann im Restmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden.



reer GmbH, Muehlstr. 41
DE-71229 Leonberg
www.reer.de

Inhalt: 1 Set
Medizinprodukt



79129



yyyy-mm-dd



order no reer



Made in China




UDI-DI (PPN): 111763347164
79129 / M001 - Rev. 013921

Nasensauger

Gebrauchsanleitung // Art.Nr.: 79129

WICHTIG!


VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN FÜR
SPÄTERES LESEN AUFBEWAHREN.

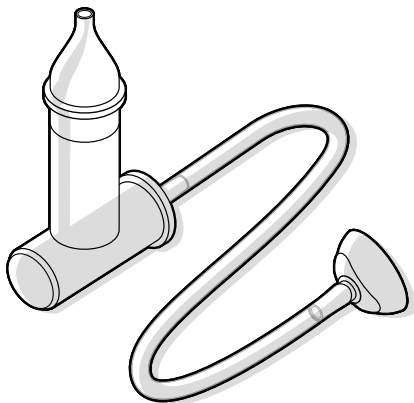

Verwendungszweck

Der reer Nasensauger unterstützt dabei, während einer Erkältung das störende Nasensekret zu entfernen und erleichtert Kindern das Atmen, Essen und Schlafen während dieser Zeit. Er ist geeignet zur Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern

- zum Freihalten der Atemwege und Sicherung der Nasenatmung im Säuglingsalter
- zur Milderung von allergischen oder allergieähnlichen Reaktionen mit Bildung von Nasensekret
- bei einer Erkältung oder Schnupfen.

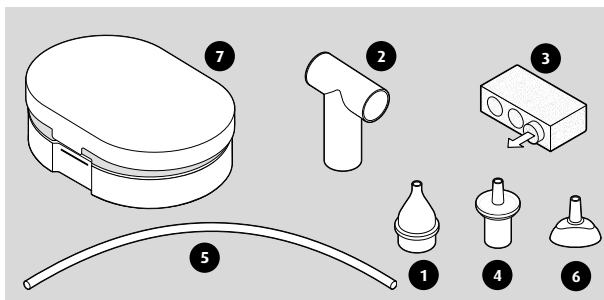

Lieferumfang & Teilebezeichnung

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. weiche Silikonspitze | 4. Schlauchanschluss |
| 2. Auffangbehälter | 5. Schlauch |
| 3. Hygienefilter (3 Stück; auswasch- oder dampfsterilisierbar) | 6. Mundstück |
| | 7. Hygiene Aufbewahrungsbox |

ACHTUNG!

Dieses Produkt dient der Unterstützung Ihres Kindes während einer Erkältung und ist kein Arzneimittel. Wenn Ihr Kind krank ist, konsultieren Sie einen Arzt.

Sicherheitshinweise

- Bitte benutzen Sie den Artikel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie den Artikel vor jeder Benutzung auf sichtbare Beschädigungen. Bei Anzeichen von Mängeln nicht verwenden, sondern entsorgen!

Verletzungsgefahr

Verwenden Sie den Nasensauger nicht bei Nasenblutung oder wunden Nasenlöchern. Nicht an Mund oder Ohren anwenden.

Verschluckungsgefahr

- Dieser Artikel ist kein Spielzeug, außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt unbeaufsichtigt. Benutzung nur durch Erwachsene.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind.

Gesundheitsrisiko

Trocknen die Teile vor dem Zusammensetzen nicht vollständig ab, besteht die Gefahr von Bakterienwachstum und Schimmelbildung.

Vorsicht!

- Niemals in das Mundstück pusten.
- Das Nichtbeachten der Hinweise kann die Gesundheit Ihres Kindes beeinträchtigen!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller oder der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbehandlung

Bei trockenen oder zähen Nasensekret können Sie die Verstopfung mit isotonischer Kochsalzlösung, Spray oder Tropfen verflüssigen. Bei Zweifel oder Unsicherheit kontaktieren Sie Ihren Kinderarzt.

Anwendung

1. Setzen Sie einen neuen oder gereinigten Filter (3) in den Schlauchanschluss (4).
2. Verbinden Sie den Schlauchanschluss (4) mit dem Auffangbehälter (2) und der Silikonspitze (1).
3. Setzen Sie den Schlauch (5) auf die Schlauchaufnahme des Auffangbehälters.
4. Setzen Sie das Mundstück (6) in das Ende des Schlauches (5).
5. Legen Sie die weiche Silikonspitze eng an die Nasenöffnung Ihres Kindes.
Achtung: nur anlegen, nicht in das Nasenloch drücken!
6. Saugen Sie am Mundstück, bis das Nasensekret im Auffangbehälter landet. Die innovative Konstruktion des Nasensaugers funktioniert mittels Unterdruck – so wird ein zu starker Sog verhindert und das Sekret bleibt im Auffangbehälter.
7. Optional können Sie den Schlauchanschluss entnehmen und den Filter austauschen. Die Filter verhindern das Übertragen von Bakterien und sind auswaschbar. Die weiche Silikonspitze ist so konzipiert, dass die Nasenschleimhaut nicht verletzt wird.

Reinigung

1. Zerlegen Sie den Nasensauger nach jeder Benutzung in seine Einzelteile.
2. Nach jeder Benutzung alle Teile samt Filter, unverzüglich mit warmem Wasser und mildem Spülmittel auswaschen.
3. Mit klarem Wasser nachspülen.
4. Vollständig abtrocknen lassen.
5. Räumen Sie die Teile niemals im feuchten Zustand in die Aufbewahrungsbox – Gefahr von Geruchs-, Bakterien und Schimmelbildung!
6. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir, den Nasensauger vor Gebrauch erneut zu reinigen und zu desinfizieren.
7. Reinigung in der Spülmaschine nur im oberen Fach oder wie in den Punkten 2 - 4 beschrieben.
8. Desinfektion im Vaporisator nur im oberen Kleinteilekorbchen oder durch ca. 5 Minuten abkochen möglich.
9. Nicht in der Mikrowelle desinfizieren!
10. Nasensauger nach Reinigung oder Desinfektion vollständig abkühlen und trocknen lassen.